

# Zentrale Wasserbehandlung für Wassersysteme von zahnärztlichen Behandlungseinheiten

**Fügen Sie ein BacTerminator® Booster Modul hinzu, um die Kapazität Ihres BacTerminator® Dental Systems zu steigern. Für eine große Klinik mit vielen zahnärztlichen Behandlungseinheiten sollten Sie einen „BacTerminator® Mega Booster“ wählen.**

## BacTerminator® Booster

BacTerminator® Booster Module dienen dazu, wasserbehandlungssystemen wie dem BacTerminator® Dental zusätzliche Kapazitäten hinzuzufügen. Auf diese Weise können solche Geräte als zentrale Wasserbehandlungssysteme verwendet werden. Dies ermöglicht beim Spitzendurchfluss eine höhere Kapazität, auch wenn mehrere zahnärztliche Behandlungsgeräte an ein einziges BacTerminator® Dental angeschlossen sind. BacTerminator® Booster wird gemäß EN ISO 13485 hergestellt.



**Abb. 1:** BacTerminator® Booster1



**Abb. 2:** BacTerminator® Booster2

## BacTerminator® Mega Booster

Bei dem BacTerminator® Mega Booster handelt es sich um eine zentrale Wasserbehandlungseinheit, die Wasserbehandlungssysteme wie BacTerminator® Dental aufnehmen kann. Das System sorgt für einen hohen kontinuierlichen Wasserdurchfluss, der für den Gebrauch in einer Klinik mit mehreren zahnärztlichen Behandlungseinheiten ausgelegt ist.

Wenn er in Verbindung mit BacTerminator® Dental verwendet wird, verfügt der BacTerminator® Mega Booster über einen eingebauten Rückflussverhinderer (EN 1717 Typ AB Luftspalt) und ein DVGW W540 Zertifikat.

BacTerminator® Mega Booster wird gemäß EN ISO 13485 hergestellt.



**Abb. 3:** BacTerminator® Mega Booster

### Abfluss:

8 mm Steckverbindung

### Externes Spülventil:

Potentialfreier Schalter

### Kommunikation:

Zwei potentialfreie Schalter.  
(OK / nicht OK)

**Ethernet:** RJ-45-Anschluss für die Fernüberwachung von Parametern

## Daten für BacTerminator® Booster-Systeme:

	B x H x L mm	Gewicht kg	Anschluss Wasser- Einlass/Auslass, (Steckverbindung / mm)	Andere externe Anschlüsse	Max. Durch- fluss l/minute	Förder- leistung, bar
BacTerminator® Booster1	250 x 220 x 360	2,4	6 mm / 8 mm	Stromversorgung: Keine	2	2,8
BacTerminator® Booster2	452 x 176 x 430	12	6 mm / 8 mm	Stromversorgung: 110V/230VAC PE Max 130VA	4	6
BacTerminator® Mega Booster	1388 x 600 x 600	70	3/8" / 3/8"	Stromversorgung: 110V/230VAC PE Max 650VA	20	6

## Hinweis


Wasser aus dem BacTerminator Dental vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Richtlinien für die Installation:**

	Nur Instrumente	Instrumente und Mundspülung	Instrumente Mundspülung und Ringspülung	Anzahl der Stühle die gleichzeitig gespült werden sollen (Morgen, Arbeitsbeginn)*
BacTerminator® Dental	3 Einheiten	2 Einheiten	1 Einheit	1 Einheit
BacTerminator® Dental + Booster1	6 Einheiten	6 Einheiten	2 Einheiten	1-2 Einheiten
BacTerminator® Dental + Booster2	10 Einheiten	6 Einheiten	6 Einheiten	2-4 Einheiten
BacTerminator® Mega Booster	30+ Einheiten	25+ Einheiten	20 Einheiten	10-15 Einheiten

\*Abhängig von Spülzeit und Volumen

**Anschlussmöglichkeiten**

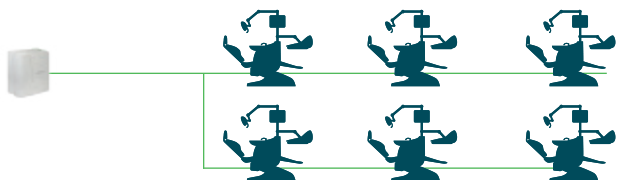


**Abb. 4:** BacTerminator® Dental Compact an BacTerminator® Booster2 angeschlossen

**Installation**

Setzen Sie sich bitte vor der Installation mit einem autorisierten Adept Water Technologies Händler in Verbindung. Durch individuelle örtliche Gegebenheiten gibt es Variablen, die abgestimmt sein müssen.

Adept Water Technologies empfiehlt, die Instrumente und das Mundspülwasser an das BacTerminator® Dental und Booster System anzuschließen. So ist auch das Wasser des Becherfüllers für den Patienten frei von Legionellen.

**Anschlussmöglichkeiten**

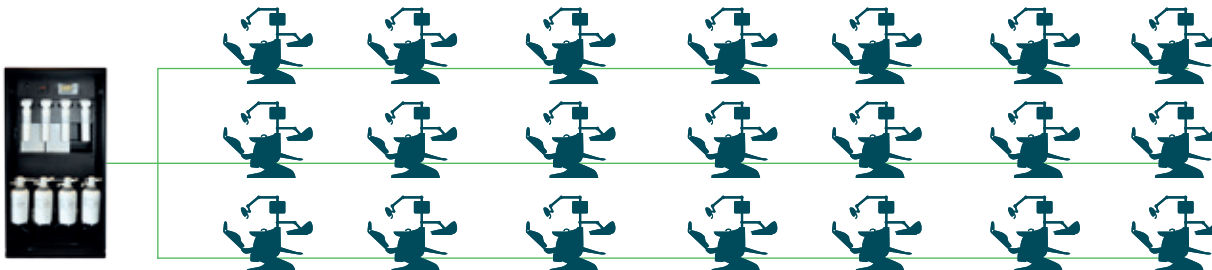

**Abb. 5:** BacTerminator® Mega Booster

**Bestellinformationen:**

System:	Kommentar	Artikel Nr.
BacTerminator® Booster1	Gebrauch mit BacTerminator® Dental oder BacTerminator® Dental Compact	140031
BacTerminator® Booster2	Gebrauch mit BacTerminator® Dental oder BacTerminator® Dental Compact	150021
BacTerminator® Mega Booster	Einschließlich 2 BacTerminator® Dental Geräte	160118
BacTerminator® Mega Booster	Ohne BacTerminator® Dental Geräte	Auf Anfrage erhältlich

**Zubehör:**

	Kommentar	Artikel Nr.
Dental Alarmüberwachung	Zum Empfang von Alarmen, falls BacTerminator® Dental und Booster in verschiedenen Räumen angebracht sind.	160102
Doppelte Wandhalterung	Zur Wandmontage von BacTerminator® Dental und Booster2	160084